

## Bifix QM – Estudio clínico de 2 años

VOCO GmbH, Departamento de Comunicación de Conocimiento

Anton-Flettner-Str. 1-3  
27472 Cuxhaven, Alemania

Tel.: +49 (0)4721-719-0  
Fax: +49 (0)4721-719-109

info@voco.de  
www.voco.es



En un estudio clínico de la Universidad Marmara de Instambul/Turquía se han observado durante un periodo de 2 años los inlays y onlays de cerámica de IPS Empress II, que han sido fijadas adhesivamente con la combinación Solobond Plus / Bifix QM.

En el estudio aquí resumido se han evaluado en total 35 restauraciones indirectas (7 inlays, 28 onlays). Los controles han sido realizados independientemente por 2 dentistas, como medida de evaluación se emplearon los criterios USPHS. Después de 6 meses hubo una pérdida de una restauración; ésta fue reinsertada en la misma sesión y quedó intacta hasta que se terminó el periodo de observación.

### Resultados según criterios USPHS

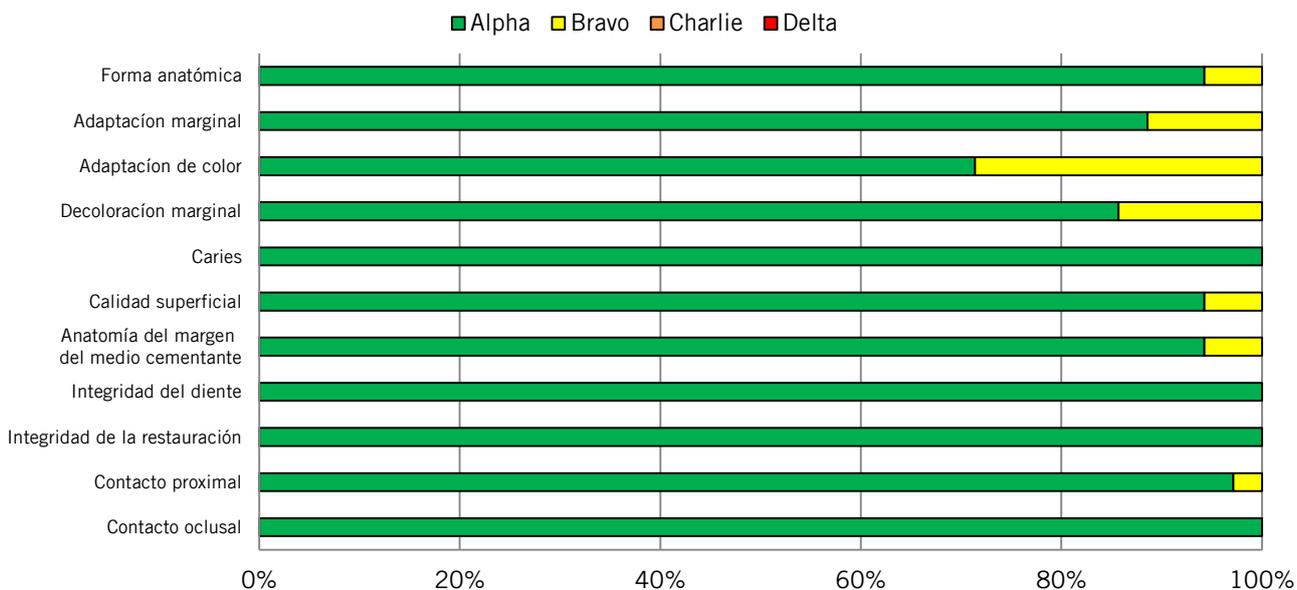


Gráfico 1: Resultados después de 24 meses

**Resultado:** La combinación de Solobond Plus y Bifix QM es una alternativa segura en la fijación de restauraciones de cerámica reforzadas con leucita.

[1] D. A. Tagtekin, G. Özyöney, F. Yanikoglu, *Oper. Dent.* **2009**, *34*, 369-378.