

# VOCO

## Registrado® Clear

**Registrado Clear** es un material de impresión de silicona reticulante por adición para el registro de la mordida que se caracteriza por su transparencia, su alta dureza final de más de 70 Shore A (especial procedimiento de medición de dureza para elastómeros) y su fraguado rápido.

### **Indicaciones:**

- Registro de la mordida
- Llave de silicona para restauraciones de composite
- Cufio anterior y oclusal
- Llave de registro para apoyar intraoralmente el registro de postes
- Fijación de bolas de rayos x

### **Modo de aplicación:**

Utilizar el dispensador de **VOCO** del tipo 2 u otra pistola de mezcla apropiada para aplicar **Registrado Clear**. Por razones técnicas se pueden producir unas pequeñas diferencias en el llenado de ambas cámaras del cartucho. Después de colocar el cartucho en el dispensador, retirar el cierre del cartucho y apretar el material hasta que salga uniformemente de ambos orificios del cartucho. A continuación, colocar la cánula de mezcla tipo 16 y estrujar el material impeliendo el disparador. El material se mezcla automática y completamente en la proporción correcta en la cánula. Para la aplicación más fina y más precisa se coloca la punta de aplicación del tipo 2 en la cánula de mezcla del tipo 16. Después del uso, poner de nuevo el cierre del cartucho. Antes de cada uso se debe controlar el orificio de salida. En caso de que la apertura esté taponada, destaponarla y esparcir una cantidad pequeña hasta que las dos pastas salgan uniformemente. Para el registro de la mordida oclusal se aplica **Registrado Clear** directamente en el arco dental superior o inferior del paciente. Cerrar la mordida dentro de 20 segundos. A temperatura ambiente (23 °C), **Registrado Clear** tiene un tiempo de trabajo de por lo menos 25 segundos. Después de una estancia en la boca de 90 segundos después de cerrar la boca se puede remover el registro de la mordida. **Registrado Clear** puede ser elaborado fácil y controladamente con un escarpelo o tijera y es duraderamente estable en su dimensión.

**Datos técnicos:**

Tiempo de elaboración (a 23 °C)	≥ 25 s
Tiempo de estancia en la boca (a 37 °C)	90 s
Dureza Shore A	> 70
Capacidad de recuperación elástica	> 99 %

**Indicaciones, medidas de prevención:**

- **Registrado Clear** contiene polidimetilsiloxanos y un catalizador de platino. **Registrado Clear** no debe ser usado en caso de hipersensibilidades (alergias) contra estos ingredientes.
- No utilizar **Registrado Clear** en combinación con siliconas reticulantes por condensación.
- La reacción de fraguado de **Registrado Clear** puede ser influida por el uso de guantes de látex, cremas de manos, detergentes, enjuague bucal, soluciones de retracción o restos de otros materiales (p. ej. materiales para impresión). Por eso, deben ser removidos antes de la aplicación (eventualmente con un spray).
- Evitar el contacto de silicona no endurecida con la ropa.
- Antes de la elaboración ulterior se recomienda una desinfección de los registros de mordida con un desinfectante agudo. Seguir las instrucciones de uso del desinfectante utilizado.
- Las propiedades prometidas del producto se conseguirán sólo bajo el uso de las cánulas de mezcla originales Sulzer Mixpac, autorizadas de **VOCO**. Nosotros, **VOCO**, disponemos de todas las cánulas de mezcla correspondientes para nuestros productos.

**Conservación:**

Conservar a temperaturas entre 4 °C - 23 °C. No utilizar después de la fecha de caducidad.

Nuestros preparados se desarrollan para uso en el sector odontológico. En lo que se refiere a la aplicación de nuestros productos, se han dado nuestras indicaciones verbales y/o escritas y consejos sin compromiso según nuestro leal saber y entender. Nuestras indicaciones y/o consejos no les dispensan de comprobar los preparados suministrados por nosotros respecto a su aptitud para la aplicación intencionada. Dado que la aplicación de nuestros preparados se efectúa fuera de nuestro control, la misma se encuentra bajo su exclusiva responsabilidad. Naturalmente les aseguramos la calidad de nuestros preparados según las normas correspondientes y de acuerdo con el estándar establecido en nuestras condiciones generales de venta y entrega.