

Solobond M – Estudio clínico de 3 años

VOCO GmbH, Departamento de Comunicación de Conocimiento

Anton-Flettner-Str. 1-3
27472 Cuxhaven, Alemania

Tel.: +49 (0)4721-719-1111
Fax: +49 (0)4721-719-109

info@voco.de
www.voco.es



En un estudio clínico de la Universidad de Leipzig se investigó el éxito de tratamientos con Solobond M / Arabesk dentro de un periodo de 3 años.^[1]

En el marco del estudio presentado se observó el tratamiento de lesiones mezcladas de la clase V en 53 dientes de 28 pacientes en total durante un periodo de 36 meses. En la terapia de obturación se utilizó la combinación de Solobond M con el material de composite Arabesk. Controles posteriores de las restauraciones fueron realizados después de 3, 12, 18, 24 y 36 meses y fueron evaluados según los criterios USPHS modificados.

Resultados de 36 meses

Los resultados de 36 meses de colocación están resumidos en el gráfico 1.

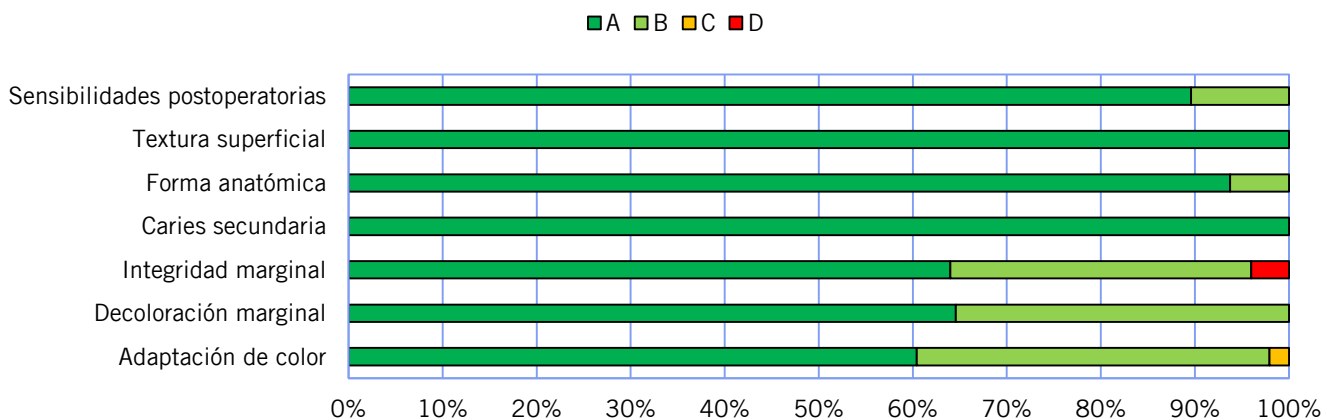


Gráfico 1: Resultados después de 36 meses

Después de 2 años y medio se presetaron solamente en dos casos una pérdida de retención, caries secundaria no pudo ser observada en ninguna restauración investigada.

Resultado: En el estudio aquí presente correspondían los tratamientos también después de 3 años a los criterios de 18 meses para una "full acceptance" por parte de la American Dental Association (ADA).

[1] G. Haßloff, M. Erler, H. Schneider, K. Merte, Universität Leipzig, informe a VOCO.