



Grandio® SO Inlay System

SET PARA LA CONFECCIÓN DE INLAYS DE
COMPOSITE INDIRECTOS EN EL SILLÓN

Grandio®SO Inlay System

HECHO SIMPLEMENTE DE COMPOSITE: EL INMEDIATO INLAY INDIRECTO DE VOCO

¿Quiere ofrecerle a sus pacientes un tratamiento con inlays asequibles y al mismo tiempo de alta calidad en una sólo sesión? ¿Y quiere evitar adicionalmente la adquisición de un aparato CAD / CAM caro y generar igualmente la totalidad del valor añadido en su consultorio? VOCO le presenta la solución en forma de un único set completo: GrandioSO Inlay System – ¡el kit práctico para la confección de inlays de composite indirectos en el sillón!

Rápido y económico

Inlays presentan en muchos aspectos grandes ventajas en cuanto al tratamiento de lesiones de dientes posteriores. Hasta ahora han implicado casi siempre mucho tiempo y altos costes. Quiere decir: Hay que utilizar aparatos caros o hay que encomendar a un laboratorio externo, el diente preparado tiene que ser sellado provisionalmente y el paciente tiene que acudir otra vez y obligatoriamente al consultorio.

Con GrandioSO Inlay System le ofrecemos ahora la posibilidad de confeccionar, simplemente y dentro de solamente una sesión, inlays de composite de primera calidad en el sillón. Así quedará el total valor añadido en su consultorio y usted realiza al mismo tiempo un tratamiento agradable y eficiente tanto para usted así como para el paciente: ¡Ningún sellado provisional, ninguna cita adicional ni una segunda anestesia!

Inlays autoconfeccionados

Usted prepara la cavidad y toma una impresión con un alginato de su preferencia. Ahora se utilizan los componentes del GrandioSO Inlay System. El proceso es como sigue:

- 1° Confección del modelo con una silicona para molde especialmente desarrollada para esta indicación
- 2° Confección del inlay de GrandioSO y elaboración
- 3° Fijación con Futurabond DC y Bifix QM
- 4° Finición y pulido con Dimanto, el pulidor de diamante de un paso

Por la confección extraoral del inlay en el modelo tiene adicionalmente la ventaja de confeccionar los contactos proximados sin ninguna técnica de matrices laboriosa. Esto le permitirá – mismo en caso de pacientes con poca o ninguna complacencia – el tratamiento sin estrés de restauraciones del color del diente y duraderas.

Componentes perfectamente combinados

Grandio®SO
Caps 15 × 0,25 grs.
(5 de cada: A2, A3, A3.5)

Dimanto®
Set 5 uds. mixto (1 punta pequeña y grande, 1 copa pequeña y grande, 1 lente)

Silicona para molde
Cartucho 3 × 50 ml
+ accesorios

Bifix® QM
QuickMix jeringa 10 grs.
universal + accesorios

Futurabond® DC
SingleDose 15 uds.
+ accesorios



Grandio®SO Inlay System

EN POCOS PASOS SE LLEGA A UN INLAY DE COMPOSITE DE ALTA CALIDAD

<p>Preparación / Toma de impresión</p> <p>▶▶▶</p>			
<p>Silicona para molde</p> <p>▶▶▶</p>			
<p>GrandioSO</p> <p>▶▶▶</p>			
<p>Futurabond DC / Bifix QM / Dimanto</p> <p>▶▶▶</p>			

Grandio®SO Inlay System

HECHO SIMPLEMENTE DE COMPOSITE: EL INMEDIATO INLAY INDIRECTO DE VOCO

Ventajas

- Set completo para la confección en el sillón de 15 inlays de composite
 - Total valor añadido en el consultorio, ninguna participación del laboratorio
 - Más económico que inlays confeccionados con CAD / CAM
- Componentes de la más alta calidad, combinados perfectamente
 - Rápida y simple confección del modelo
 - GrandioSO, el composite de calidad premium, como garante para la durabilidad y estética
 - Futurabond DC y Bifix QM para una fijación segura
- Método simple y eficiente
 - Confección cómoda también en caso de restauraciones amplias y multisuperficiales
 - Confección de las así llamadas “calles de inlay” en dientes vecinos
 - Elaboración de contactos proximados sin técnicas de matrices laboriosas y costosas
 - Perfecta anatomía oclusal – el modelado se efectúa fuera de la boca
 - Confección sin estrés de restauraciones del color del diente y duraderas también en el caso de pacientes con poca complacencia

Presentaciones

- REF 2642 Set cartucho 3 × 50 ml silicona para molde, GrandioSO Caps 15 × 0,25 grs. (de cada 5 × A2, A3, A3.5), Futurabond DC *SingleDose* 15 u., QuickMix jeringa Bifix QM 10 grs. universal, Dimanto Set (de cada 1 × punta pequeña, punta grande, copa pequeña, copa grande, lente), accesorios
- REF 1186 Silicona para molde – cartucho 2 × 50 ml, accesorios
- REF 9301 Dispenser – Caps
- REF 2158 Dispensador – tipo 2
- REF 2202 Puntas de mezcla tipo 20 para la silicona para molde, 50 u.



VOCO GmbH
 Anton-Flettner-Straße 1-3
 27472 Cuxhaven
 Germany

Línea gratuita: +800 44 444 555
 Fax: +49 (0) 4721-719-140

info@voco.com
 www.voco.com

Distribuidor: