

# VOCO

## Individo Lux

### Instrucciones de uso

#### Descripción del producto:

**Individo Lux azul opaco** e **Individo Lux azul transparente** son resinas fotopolimerizables opacos respectivamente transparentes en forma de modelos preformados de mandíbulas superiores e inferiores para la confección de cubetas individuales de impresión y función en la técnica de prótesis total, de coronas y puentes así como para la elaboración de bases para modelos de dentadura. Ambas resinas están listas para el uso y fáciles de emplear sin cualquier olor molesto.

**Individo Lux** se puede trabajar por un largo período de tiempo con luz ambiente y luz natural y se endurece rápidamente con luz ultravioleta o halógena. Se pueden emplear las cubetas individuales directamente después de su confección.

**Individo Lux** tiene un sabor agradable a menta.

#### Modo de aplicación:

Antes del uso, dejar reposar **Individo Lux** hasta haber resumido temperatura ambiente. Marcar el contorno para la cubeta individual en el modelo de yeso. Si necesario, colocar fijadores. Si no se requieren fijadores se recomienda aislar el modelo de yeso.

Remover la hoja protectora y colocar la chapa en el modelo. Moldear y recortar los bordes marcados. La transparencia de **Individo Lux azul transparente** permite un moldeo muy exacto. El material excedente se puede usar para hacer el cabo. **Individo Lux** se polimeriza en el modelo con una lámpara común (luz halógena o ultravioleta). Según el espesor de la cubeta moldeada, exponer la parte trasera a la luz por 3 - 5 min. Un tiempo prolongado de polimerización mejora las propiedades físicas del material. Si necesario, prolongar correspondientemente el tiempo de exposición.

La cubeta moldeada está lista para el uso inmediato o se puede trabajar inmediatamente. Una pequeña capa de inhibición, que acaso puede formarse bajo la influencia del oxígeno en el aire, puede ser removida con un pañito mojado con alcohol.

**Conservación:**

Conservar a temperaturas entre 4 °C - 23 °C.

Guardar en lugar fresco y protegido contra la luz.

**Precauciones/indicaciones:**

Una exposición a la luz muy corta o una intensidad muy pequeña provoca una pérdida de estabilidad.

**Individo Lux** contiene Bis-GMA, UDMA, TEGDMA, aceite de menta, BHT. **Individo Lux** no debe ser usado en caso de hipersensibilidades (alergias) contra estos ingredientes. No utilizar después de la fecha de caducidad.

Nuestros preparados se desarrollan para uso en el sector odontológico. En lo que se refiere a la aplicación de nuestros productos, se han dado nuestras indicaciones verbales y/o escritas y consejos sin compromiso según nuestro leal saber y entender. Nuestras indicaciones y/o consejos no les dispensan comprobar los preparados suministrados por nosotros respecto a su aptitud para la aplicación intencionada. Dado que la aplicación de nuestros preparados se efectúa fuera de nuestro control, la misma se encuentra bajo su exclusiva responsabilidad. Naturalmente les aseguramos la calidad de nuestros preparados según las normas correspondientes y de acuerdo con el estándar establecido en nuestras condiciones generales de venta y entrega.