

Calcimol LC

ES

Instrucciones de uso

Descripción del producto:

La pasta de hidróxido de calcio **Calcimol LC** es un material fotopolimerizable y radiopaco con un solo componente.

Campos de aplicación:

- Recubrimiento pulpar indirecto
- Forro cavitario debajo de todos los materiales de restauración

Aplicación:

Al aplicar el producto, compruebe que las superficies dentales estén completamente secas y evite que se produzca alguna contaminación. Para aplicaciones en la región dentinaria adyacente (< 0,5 mm) a la pulpa y para el recubrimiento pulpar directo, utilice un preparado acuoso de hidróxido de calcio en sustitución del **Calcimol LC**.

Calcimol LC puede aplicarse en la cavidad directamente desde la jeringa. Con el fin de asegurar el correcto funcionamiento de la jeringa sin retorno, asegúrese de que el émbolo no se retraiga durante su uso ni después de éste. Vierta la cantidad requerida de **Calcimol LC** del tubo sobre una loseta de mezcla y aplíquela en la cavidad usando un instrumento adecuado. En caso de forros cavitarios de un grosor superior a 1 mm, coloque el material por capas sucesivas y deje fraguar cada capa con luz azul durante 20 s como mínimo.

Si se requieren valores de adhesión altos (p. ej., al utilizar **Calcimol LC** en tratamientos adhesivos de obturación), puede utilizarse el adhesivo adecuado antes de aplicar **Calcimol LC**. Ténganse en cuenta al respecto las instrucciones de uso del fabricante del adhesivo.

Antes de la fotopolimerización, elimine por completo el exceso de material con utensilios apropiados. Elimine el exceso de material ya polimerizado, no con una sonda, sino utilizando cuidadosamente un instrumento rotatorio y, seguidamente, coloque la obturación de acuerdo con las indicaciones del fabricante.

Indicaciones, medidas de prevención:

Calcimol LC no debe aplicarse en la zona de los márgenes de restauración. En esta zona, la obturación definitiva debe descansar siempre sobre la sustancia dental no cariada, previamente acondicionada –dado el caso– para la técnica adhesiva.

Calcimol LC se adhiere a preparados con base de metacrilato como, p. ej., materiales para coronas y puentes o para sellado provisional, así como a algunos materiales de impresión (p. ej., poliéter), propiedad que puede comportar la eliminación del forro cavitario. En estos casos se recomienda aplicar una barrera (p. ej., de vaselina o gel de glicerina). Antes de practicar la restauración definitiva, elimine el agente aislante.

Después de retirarse el **Calcimol LC**, evite la incidencia directa de luz (lámpara de quirófano, luz solar) y efectúe la aplicación con la mayor rapidez posible.

Calcimol LC contiene metacrilatos, BHT y aminas. **Calcimol LC** no debe ser usado en caso de hipersensibilidades (alergias) contra estos ingredientes. Dado que el hidróxido de calcio produce un efecto cáustico sobre la piel y las mucosas, evite a toda costa el contacto con los ojos.

Las sustancias fenólicas, incluyendo en particular los preparados con eugenol y timol, menoscaban el fraguado del **Calcimol LC**. Por ello, en combinación con **Calcimol LC**, debe evitarse la utilización de cementos de óxido de cinc eugenol o de otros materiales que contengan eugenol.

Aproxime la mirilla de salida de luz de la lámpara tanto como sea posible a la superficie de la obturación, con el fin de alcanzar un endurecimiento óptimo. Si, por el contrario, el fraguado es deficiente, puede provocar pérdidas de resistencia y molestias.

Conservación:

Conservar el producto en lugar protegido de la luz y la humedad a una temperatura entre 4 °C - 23 °C. Guarde la jeringa en su bolsa de aluminio cerrada hasta el momento de usarla por primera vez. Una vez abierta la bolsa, utilice el material dentro de los 6 meses siguientes, y siempre antes de la fecha de caducidad. Entre aplicación y aplicación, mantenga la jeringa dentro de su recipiente, cerrado con el tapón original.

Nuestros preparados se desarrollan para uso en el sector odontológico. En lo que se refiere a la aplicación de nuestros productos, se han dado nuestras indicaciones verbales y/o escritas y consejos sin compromiso según nuestro leal saber y entender. Nuestras indicaciones y/o consejos no les dispensan comprobar los preparados suministrados por nosotros respecto a su aptitud para la aplicación intencionada. Dado que la aplicación de nuestros preparados se efectúa fuera de nuestro control, la misma se encuentra bajo su exclusiva responsabilidad. Naturalmente les aseguramos la calidad de nuestros preparados según las normas correspondientes y de acuerdo con el estándar establecido en nuestras condiciones generales de venta y entrega.