

VOCO

Calcimol

ES

Instrucciones de uso

Descripción del producto:

Calcimol es una pasta de hidróxido de calcio, autopolimerizable, radiopaca.

Ámbitos de aplicación:

Calcimol se utiliza como recubrimiento pulpar indirecto y como relleno de base para todos los materiales de obturación dentales.

Aplicación:

Mezclar cantidades iguales de la pasta de base **Calcimol** y del catalizador (proporción de mezcla 1,2 : 1 g/g) por aprox. 10 s, hasta que el material adquiera una consistencia homogénea y un color uniforme. ¡No mezclar durante demasiado tiempo!

Aplicar el **Calcimol** mezclado lo antes posible en la cavidad. Utilizar **Calcimol** a temperatura ambiente (15 °C - 23 °C). En caso de temperatura ambiente **Calcimol** queda trabajable durante unos 2 min y endurece en la boca durante aprox. 2 - 4 min. Temperaturas más elevadas y humedad del aire aceleran el proceso de fraguado y disminuyen el tiempo de trabajo, de modo que endurece más rápidamente en la boca.

Indicaciones/precauciones:

Calcimol contiene hidróxido de calcio, salicilato, tungsteno de calcio, N-otiltolul de sulfonamida. **Calcimol** no debe ser usado en caso de hipersensibilidades (alergias) contra estos ingredientes. Guardar el fraguado antes de la aplicación de la obturación para que se alcance una estabilidad suficiente para aplicar la obturación. No utilizar **Calcimol** como obturación provisional o único relleno de base que esté expuesto a fuerzas de mordida. En caso de temperatura baja se solidifica el catalizador, por eso, dejar alcanzar temperatura ambiente, antes del uso, eventualmente calentar brevemente el producto a aprox. 40 °C.

Calcimol tiene un efecto muy alcalino, evitar en todo caso el contacto con los ojos (mucosas).

Evitar contacto con cáusticos lo mejor posible (solubilidad).

Conservación:

Calcimol puede ser conservado a temperatura ambiente (15 °C - 23 °C).

¡Cerrar bien los tubos después del uso, sin confundir los tapones de ambos recipientes! ¡Evitar la influencia de humedad!

No utilizar después de la fecha de caducidad.

Nuestros preparados se desarrollan para uso en el sector odontológico. En lo que se refiere a la aplicación de nuestros productos, se han dado nuestras indicaciones verbales y/o escritas y consejos sin compromiso según nuestro leal saber y entender. Nuestras indicaciones y/o consejos no les dispensan comprobar los preparados suministrados por nosotros respecto a su aptitud para la aplicación intencionada. Dado que la aplicación de nuestros preparados se efectúa fuera de nuestro control, la misma se encuentra bajo su exclusiva responsabilidad. Naturalmente les aseguramos la calidad de nuestros preparados según las normas correspondientes y de acuerdo con el estándar establecido en nuestras condiciones generales de venta y entrega.