

Descripción del producto:

Ceramic Bond es un adhesivo monocomponente para la unión adhesiva y duradera entre cerámica también dióxido de zirconio y composite, así como para la silanización de postes radiculares reforzados con fibras de vidrio antes de la adhesión en el canal radicular.

Indicación:

Ceramic Bond se emplea como adhesivo de cerámica para una unión óptima y química entre cerámicas de silicato, óxido de aluminio y dióxido de zirconio, los postes radiculares de composite reforzados con fibra de vidrio y los materiales de composite.

Aplicación:**En caso de superficies de cerámica:**

Con la silanización superficial de restauraciones de cerámica total, también de dióxido de zirconio, se consiguen óptimas condiciones para una unión duradera entre la cerámica y el composite.

1. Después de haber chequeado la restauración de porcelana, limpiar las superficies de fijación mediante la técnica de grabado o chorro de aire, limpiar esmeradamente con agua y secar con aire sin aceite.
2. Aplicar **Ceramic Bond** con un pincel en las así superficies acondicionadas, dejar penetrar 60 s y secar esmeradamente con aire sin aceite.
3. Aplicar el composite de fijación correspondientemente a las instrucciones de uso y colocar en el trabajo.

En caso de postes radiculares reforzados con fibras de vidrio:

1. Después de la elaboración correspondiente del canal radicular probar el poste radicular de composite reforzado con fibra de vidrio, reducir el poste al tamaño de trabajo, limpiar con alcohol y secar con aire libre de aceite.
2. Humedecer luego el poste con **Ceramic Bond** y dejar secar unos 60 s.
3. A continuación pegar el poste en el canal radicular según las instrucciones del fabricante.

Indicaciones y medidas precautorias:

Ceramic Bond contiene ácidos orgánicos, 3-metacril-oxipropiltrimetoxisilano y acetona. **Ceramic Bond** no debe ser usado en caso de hipersensibilidades (alergias) contra estos ingredientes.

La contaminación de las superficies adhesivas silanizadas (p. ej. saliva o sangre), puede causar una adhesión reducida de **Ceramic Bond**. Limpiar nuevamente con el material grabador las superficies contaminadas, a continuación, enjuagar y secar.

Ciérrese el frasco después del uso.

El contacto de **Ceramic Bond** no endurecido con la piel/mucosa y ojos puede ser un poco irritante y debería ser evitado.

Conservación:

Consérvese **Ceramic Bond** entre 4 °C - 23 °C. Se recomienda la conservación en el refrigerador. No utilizar después de la fecha de caducidad.

Nuestros preparados se desarrollan para uso en el sector odontológico. En lo que se refiere a la aplicación de nuestros productos, se han dado nuestras indicaciones verbales y/o escritas y consejos sin compromiso según nuestro leal saber y entender. Nuestras indicaciones y/o consejos no les dispensan de comprobar los preparados suministrados por nosotros respecto a su aptitud para la aplicación intencionada. Dado que la aplicación de nuestros preparados se efectúa fuera de nuestro control, la misma se encuentra bajo su exclusiva responsabilidad. Naturalmente les aseguramos la calidad de nuestros preparados según las normas correspondientes y de acuerdo con el estándar establecido en nuestras condiciones generales de venta y entrega.