

Grandio Flow – Tratamiento de superficies oclusales

VOCO GmbH, Departamento de Comunicación de Conocimiento

Anton-Flettner-Str. 1-3
27472 Cuxhaven, Alemania

Tel.: +49 (0)4721-719-1111
Fax: +49 (0)4721-719-109

info@voco.de
www.voco.es



En el sellado ampliado de fisuras o bien el tratamiento de cavidades de la clase I se trabaja en muchos casos con Flowables. En un estudio de 2 años de la Universidad de Maguncia, Alemania se ha examinado y evaluado la aptitud de Grandio Flow en esta indicación.

Estudio in-vivo de la Universidad de Maguncia/Alemania^[1]

En este estudio se ha observado y evaluado el sellado con Grandio Flow durante el período de 2 años, Solobond M ha sido usado como adhesivo. La evaluación estaba sujeta a los criterios Ryge y CDA. La imagen I indica los resultados después de 24 meses; dado que los criterios se diferenciarán de los aspectos individuales, en el gráfico se clasifica entre el mejor valor posible, segundo mejor (los cuales presentan siempre valores clínicamente aceptables) y clínicamente no aceptable.

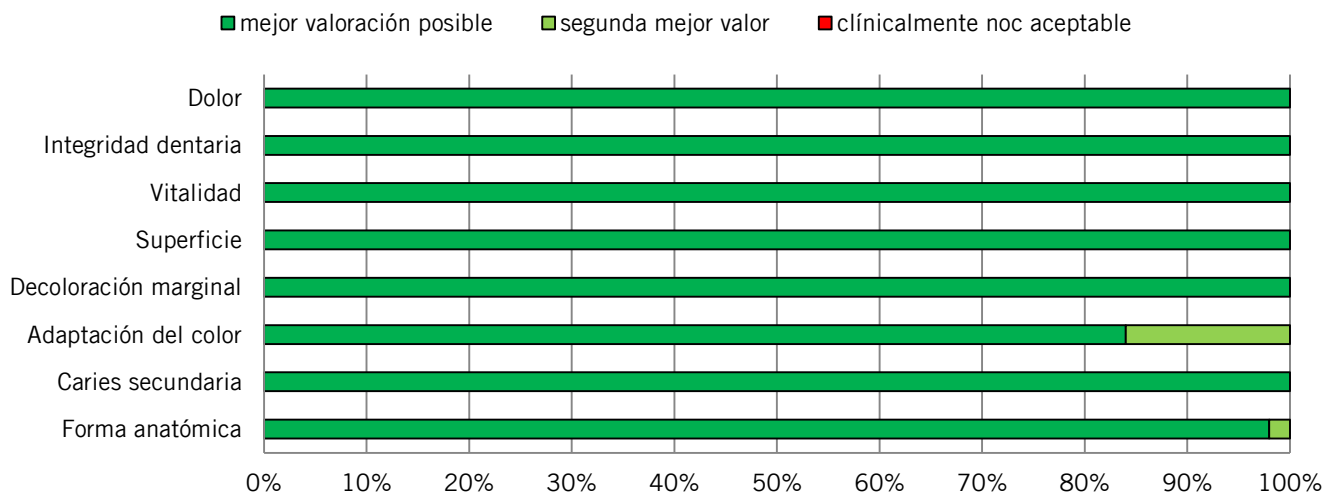


Ilustración I: Absorción de agua después de conservación en lugar oscuro en agua destilada a 37° C.

En cuanto a la evaluación de la adaptación de color hay que constar que la segunda mejor valoración ya ha sido dada en caso de ligeras diferencias en la opacidad. El tono también no se diferencia del tono natural del diente en cuanto a estos sellados

El resultado: Grandio Flow es excelentemente apropiado para el tratamiento de pequeños defectos de la superficie oclusal / el sellado ampliado de fisuras.

[1] Prof. Dr. Ernst, Universidad de Maguncia, Reporte a VOCO, Diciembre 2007