



Traypurol tabs

Tabs activas para la limpieza de cubetas para impresiones e instrumentos.

Traypurol tabs remueven residuos de alginato, cementos de óxido de cinc-eugenol, carboxilato y de fosfato de cubetas para impresiones e instrumentos sin dispositivos de ultrasonido. **Traypurol tabs** son biodegradables.

Aplicación:

Para 1 l de solución de limpieza se necesitan 2 pastillas **Traypurol tabs**. Sacar simplemente las pastillas del plástico, echarlas en el recipiente de limpieza y llenar con agua fría o caliente. El agua caliente acelera el proceso de limpieza. Evitar el contacto con la piel.

Dado el caso, limpiar groseramente las cubetas e instrumentos y sumergir en la solución de **Traypurol tabs**. Si las cubetas están derechas se promueve el proceso de limpieza.

Con las **Traypurol tabs** serán reblandecidos los residuos de materiales en poco tiempo y a continuación completamente despegados. Dejar preferiblemente las cubetas para impresión e instrumentos durante 2 h en la solución, pero no más que 72 horas. Después de la limpieza, lavar con agua.

Traypurol tabs son apropiadas para todos los metales inoxidables y plásticos. La solución debería ser cambiada después de 2 - 3 días.

Traypurol tabs también pueden ser utilizadas en el baño ultrasónico.

Contiene agentes complejos > 30%, tensioactivos no iónicos < 5%, inhibidores de corrosión.

Conservar **Traypurol tabs** en una área seca entre 4°C - 23°C.

No utilizar en el lavavajillas.

Indicación de peligro:

Irrita los ojos.

Sugerencias de seguridad:

En caso de contacto con los ojos, lavar bien con agua y consultar un oftalmólogo. Al tragar, pedir consejo de un médico y mostrar el envase.

Nuestros preparados se desarrollan para uso en el sector odontológico. En lo que se refiere a la aplicación de nuestros productos, se han dado nuestras indicaciones verbales y/o escritas y consejos sin compromiso según nuestro leal saber y entender. Nuestras indicaciones y/o consejos no les dispensan comprobar los preparados suministrados por nosotros respecto a su aptitud para la aplicación intencionada. Dado que la aplicación de nuestros preparados se efectúa fuera de nuestro control, la misma se encuentra bajo su exclusiva responsabilidad. Naturalmente les aseguramos la calidad de nuestros preparados según las normas correspondientes y de acuerdo con el estándar establecido en nuestras condiciones generales de venta y entrega.