

# Resumen



Insertos	Modos máximos recomendados				Ajuste* correcto	Irrigación ml/min
BS1S	D1	D2	D3	D4		60
BS1L	D1	D2	D3	D4		60
BS2L	D1	D2	D3	D4		60
BS2R	D1	D2	D3	D4		60
BS4	D1	D2	D3	D4		60
BS5	D1	D2	D3	D4		60
BS6	D1	D2	D3	D4		60
SL1	D1	D2	D3	D4		60
SL2	D1	D2	D3	D4		60
SL3	D1	D2	D3	D4		50
SL4	D1	D2	D3	D4		30
SL5	D1	D2	D3	D4		30
TKW1	D1	D2	D3	D4		100
TKW2	D1	D2	D3	D4		100
TKW3	D1	D2	D3	D4		100
TKW4	D1	D2	D3	D4		100

\*No aplicable al PIEZOTOME SOLO (LED).

# Resumen



## Insertos

## Modos máximos recomendados

## Ajuste\* correcto

## Irrigación ml/min

TKW5



30-40

CS1



80-100

CS2



80-100

CS3



80-100

CS4



80-100

CS5



80-100

CS6



80-100

LC1



60-80

LC190°



60-80

LC2



60-80

LC2L



60-80

LC2R



60-80

NINJA™



60-80

CE1



60-80

CE2



60-80

CE3



60-80

\*No aplicable al PIEZOTOME SOLO (LED).