



GREEN&CLEAN M2

Desinfección del sistema de aspiración

GREEN&CLEAN M2

1

Accionar dos veces la bomba dosificadora (= 6 ml de concentrado)

2

Llenar el recipiente con agua hasta la marca (= 600 ml solución al 1%)

3

Colocar la cánula pequeña en el orificio marcado con 1 hasta que se aspire aire

4

Colocar la cánula grande en el orificio marcado con 2 hasta que se aspire aire

5

Vaciar el líquido restante en la taza de la escupidera

Desinfección con GREEN&CLEAN M2:

- 2 veces al día (a mediodía y por la tarde) y tras toda intervención quirúrgica
- enjuagar el sistema con agua fría tras cada tratamiento
- al cabo de 80 aplicaciones (1 bolsa) cambiar de color
- usar guantes de protección durante la desinfección
- observar exactamente la dosificación

GREEN&CLEAN M2: Desinfección del sistema de aspiración cuidando el material

(incl. escupidera, separadores de amalgama, separación de aire y agua)

- sistema dual (rojo/verde) contra resistencia bacterial
- VHB/VIH/VHC, bactericida/fungicida, tuberculocida
- de alta concentración y fácil de dosificar
- excelente poder disolvente de proteínas y desodorizante
- antiespumante activo
- listado en DGHM/VAH, CE-0408